

Intim Candida gyorsteszt

Gyors, egyszerűen használható, otthon elvégezhető teszt a hüvelyi gombafertőzés kimutatására

Kérem a teszt használata előtt, olvassa el a következő útmutatót!

Mikor használjuk a tesztet:

A teszt használata akkor javasolt, ha a következő tünetek valamelyike fennáll:

- Akut viszketés
- Hüvelyi irritáció, érzékenység, folyás
- Kiütés a szeméremajkakon
- Égő, viszkető érzés, mely vizeletkor fokozódik




Használati útmutató:

- A tesztet csak közvetlenül a használat előtt szabad felbontani.
- Ne használja a tesztet, ha a csomagolás sérült.
- A teszt elvégzéséhez szükséges egy időmérő eszköz (óra).
- Helyezze a tesztet tiszta felületre, és alaposan mosson kezet!

1. Vegye ki a tesztet a lezárt csomagolásból és helyezze egy tiszta vízszintes felületre.
2. Az egyik kezével fogja meg a testkészüléket, a másik kezével távolítsa el a lila kupakot fedő alumínium fóliát. FIGYELEM! A lila kupak folyadékot tartalmaz.
3. Vegye ki a csomagolásból a mintavételi pálcát.
4. Helyezze a mintavételi pálcát a hüvelybe, egészen addig, amíg ujjai el nem érik a szeméremajkakot. A felhelyezett pálcát forgassa meg legalább ötször azért, hogy mintát tudjon venni a hüvely faláról, majd óvatosan húzza ki a pálcát a hüvelyből.
5. Helyezze a mintavételi pálcát a lila kupakban található folyadékba és forgassa meg a pálcát legalább 10-15-ször.
6. Az egyik kezével fogja meg a testkészüléket a másik kezével, pedig óvatosan forgassa el a lila kupakot (a) az óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig. Így a kupakon és a készüléken található bevágás találkozik (b).

Kérjük, figyeljen arra, hogy ha nem látja az eredményablakban, hogy folyadék áramlik akkor meg kell ismételnie a 6. pontban leírtakat legfeljebb háromszor. Tehát újra el kell forgatnia a kupakot az eredeti állásba (a). Biztosítsa, hogy a bevágások a kupakon és a testkészüléken találkozzanak (b).

7. 10 perc elteltével olvassa le az eredményt. Egy kék csík fog megjelenni a kontroll sávban (C). Pozitív eredmény esetén, még egy kék vonal fog megjelenni a teszt (T) sávban. Ha nincs eredmény, várjon további 10 percet de, a várakozási idő semmiféle képen ne haladjon meg a 20 perct!

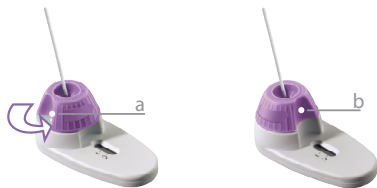

Eredmények értékelése:

1. **Pozitív** - Mindkét vonal megjelenése Candida fertőzés jelenléte.

Figyelem:

Nem számít, hogy melyik vonal a sötétebb.

2. **Negatív** - Egy vonal megjelenése a kontroll sávban (C). Nincs Candida fertőzés

Figyelem:

Ha NEM jelenik meg vonal, vagy csak a TESZT SÁVABAN jelenik meg vonal, a teszt érvénytelennek tekintendő! Ebben az esetben új tesztet kell elvégezni az utasítások pontos betartásával.

A teszt behatárolása:

- A hüvelyi gomba teszt nem újrafelhasználható.
- A teszt kizárólag akkor működik, ha az utasításokat pontosan betartja.
- Negatív teszt eredmény nem zárja ki más fertőzés jelenlétét. Konzultáljon orvosával!
- A teszt nem használható a menstruáció ideje alatt.
- Hüvelyi fertőzés, gyógyszeres kezelése után, 7 napot várjon a teszt elvégzésével!
- Hüvelyi krém, gél, kúp, irrigáló oldat használata után a teszt, 24 óra múlva végezhető el!

FIGYELEM:

- Ne használja a tesztet a csomagoláson feltüntetett lejárati időn túl.
- A tesztet száraz helyen, szobahőmérsékleten 8 - 30 Celsius fok között kell tárolni.
- Gyermeknek elől gondosan elzárandó.
- Kizárólag in vitro diagnosztikai használatra. Belsőleg nem használható.
- Használat után a testkészüléket és a mintavételi pálcát dobja a szemétkébe.

Kérdések & Válaszok:

K: Mi a teendő, ha a teszt eredmény negatív?

V: Esetleges más fertőzés miatt konzultáljon orvosával.

K: Mi a teendő, ha a teszt eredmény pozitív?

V: Kérem, forduljon orvosához, hogy megfelelő kezeléssel részesüljön.

K: Pozitív eredmény esetén mindkét vonal egyformán erősen látszik?

V: Nem szükségszerűen. Nem számít, hogy melyik vonal sötétebb, még ha a vonal halvány, akkor is pozitív az eredmény

K: Mennyire fontos az idő betartása a teszt elvégzése során?

V: A teszt elvégzése során fontos, hogy betartsuk a 10-20 perc közötti időtartamot. Ne legyen 20 percnél több az eredményleolvasás.

K: Honnan tudom, hogy a mintavételi pálcát helyesen használom és elegendő mintát nyertem?

V: A teszt elég érzékeny ahhoz, hogy kis mennyiségű gombát is kimutasson.

K: Használható-e a teszt, ha hüvelykrémet, gél, kúp, irrigáló oldatot használtam?

V: Ilyenkor a teszt nem használható. Kérjük, várjon 24 órát.

K: Használható-e a tesztet, ha hüvelyi fertőzés miatt gyógyszeres kezelésben részesültem?

V: A gyógyszeres kezelés befejezése után várjon 7 napot, és utána végezze el a tesztet.

K: Mit jelent, ha a testkészülékből folyadék csepeg?

V: Hogy ha minden komponens sértetlen maradt a testkészülék használható. Ha bármely komponens, csomagolás sérült a teszt nem használható.

K: Mit jelent, ha nem jelenik meg csik az eredmény-leolvasó ablakban?

V: A teszt érvénytelen.

K: A nap mely időszakában javasolt a teszt elvégzése?

V: A teszt a nap bármely időszakában elvégezhető.

K: Mi a teendő, ha a készülék kupakjában lévő folyadék kifolyik a védőfólia eltávolítása során?

V: Ilyen esetben a teszt nem használható. A kupakban lévő folyadék mennyisége létfontosságú a teszt elvégzéséhez.

K: Mi a teendő, ha a teszt elvégzése előtt leejtettem a mintavételi pálcát?

V: A teszt nem használható.

K: Ha nem távolítottam el a védőfóliát vagy nem helyeztem bele a mintavételi pálcát a kupakba, de elforgattam a kupakot, akkor visszafordíthatom-e a kupakot?

V: Nem. Ha egyszer a testkészülék felső részét elforgatta, akkor a teszt már nem reverzibilis, tehát a teszt nem használható.

! Lásd a mellékelt tájékoztatót

☒ Csak egyszer használható!

🌡 Tárolási hőmérséklet

📦 Felhasználható

LOT Sorozatszám

IVD In vitro diagnosztikai használatra

🏠 Gyártó

📅 Gyártási dátum

📦 Tartalmaz <1> darab tesztet

CE IVD Directive 98/79 EC

? 📞 (1) 279-10-44, (1) 279-10-45

EC|REP: Obelis S.A. / EC REP 34 Av. De Tervuren, bte 44 B-1040 Brussels, Belgium

Magyarországi forgalmazó: MedicoPlan Bt. 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körút 3/b

: Savyon Diagnostics Ltd., 3 Habosem Street, Ashdod, 77610, Israel.

Kiadási dátum, verzió szám: M42013-P05 01-11/06